

Connector **(Verarbeitungsanleitung)**

Hochaktives, chemisches Aufrauhmittel für kreuzvernetzte Zähne und Kunststoffe.

Indikation:

Aufrauhmittel für kreuzvernetzte Zähne und Kunststoffe.

Verarbeitung:

Die zuvor mechanisch angerauhten Zähne werden dünn mit *Connector* bestrichen. Dabei dürfen keine „Flüssigkeitspfützen“ stehen bleiben. Die so behandelten Zähne 2-3 min. ablüften lassen. Anschließend wird der Kunststoff appliziert.

Lagerung:

Bei 10-25°C lagern. Beachten Sie das Verfallsdatum.

Lieferform:

Flüssigkeit in 50 ml.

Gefahrenhinweis:

Hautkontakt mit der Flüssigkeit und Einatmen von Dämpfen ist zu vermeiden. Anbruchgebinde: Nach Ablauf der Haltbarkeitsdauer nicht mehr verwenden.

Entsorgung:

Die Flüssigkeit muss im Sondermüll entsorgt werden.

CE0297

Version 05/2016